

トレースチェック PLUS

ご使用前にこの添付文書をよくお読みください。

「内容」

- ① ヒト型酵素を使用し、ヒト血清と物理的性状、反応性の類似したコントロール血清です。
- ② 試料調製が容易な液状凍結品です。
- ③ トレースキャリブ PLUS で検量した、弊社試薬での測定値を表示しています。

「内容」

77940 トレースチェック PLUS

Level 1 2 mL × 3 本

Level 2 2 mL × 3 本

「使用酵素」

項 目	由 来
A S T	ヒトリコンビナント
A L T	ヒトリコンビナント
γ-G T	ヒトリコンビナント
C K	ヒトリコンビナント
A L P	ヒトリコンビナント
L D	ヒトリコンビナント
A M Y	ヒトリコンビナント
C h E	ヒト血清

「対象製品」

弊社 シカリキッドシリーズ、シカフィットシリーズ他。
対象製品、自動分析装置の詳細については、弊社までお問い合わせ下さい。

「使用法」

本品を冷凍庫から取り出し、15～25℃にて 20 分静置して融解します。完全に融解したことを確認した後、穏やかに 10 回転倒混和して均一とします。融解後は 2～8℃で保存し、24 時間以内にご使用下さい。

「使用上の注意」

- ① 本品は弊社対象キットについて有効です。
- ② 本品は融解後 1 回限りの使用とし、再凍結させないで下さい。
- ③ 本品は防腐剤としてアジ化ナトリウムを含有していますので、皮膚等に付着した場合は直ちに大量の水で洗い流して下さい。また、廃棄するときも大量の水で流して下さい。
- ④ 本品は HIV 抗体、HCV 抗体、HBs 抗原、HIV 抗原について陰性であることを確認しております。しかしながら、感染性因子を完全に否定できる検査はありません。したがって、取り扱いには患者検体同様に、注意して行って下さい。

「貯蔵方法・有効期間」

1. 貯蔵方法：-20℃以下で保存する。
2. 有効期間：表示期限まで有効。

「問い合わせ先」

関東化学株式会社 ライフサイエンス部
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 2-2-1
Tel 03-6214-1091

「製造販売元」

関東化学株式会社
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 2-2-1
Tel 03-6214-1091



T632941/2

『酵素活性値表』 ※、※※

下記酵素活性値は、JSCC/JCCLS 標準化対応法及び IFCC 標準化対応法としての値です。

酵素活性値は、本製造番号の製品のみ有効です。

製造番号： 6 P O 5 8 1

使用期限： 2 0 2 7 . 1 1 . 1 4

項目	製品名	測定原理	LEVEL 1		LEVEL 2	
			活性値±不確かさ ^{注)}	管理限界	活性値±不確かさ ^{注)}	管理限界
AST	シカリット [®] AST シカフィット AST ラホ [®] フィット AST	JSCC 標準化対応法	35 ± 1.3	33 - 37	186 ± 7.4	177 - 195
ALT	シカリット [®] ALT シカフィット ALT ラホ [®] フィット ALT	JSCC 標準化対応法	36 ± 1.0	34 - 38	194 ± 5.9	184 - 204
γ-GT	シカリット [®] γ-GT J シカフィット γ-GT ラホ [®] フィット γ-GT	JSCC 標準化対応法	38 ± 1.4	36 - 40	203 ± 7.2	193 - 213
CK	シカリット [®] CK シカフィット CK ラホ [®] フィット CK シカフィット CK II	JSCC 標準化対応法	108 ± 3.1	103 - 113	570 ± 16.6	541 - 599
ALP	シカリット [®] ALP-IFCC	IFCC 標準化対応法	50 ± 2.0	47 - 53	265 ± 10.7	252 - 278
LD	シカフィット LD-IFCC	IFCC 標準化対応法	73 ± 2.3	69 - 77	377 ± 11.1	358 - 396
AMY	シカリット [®] AMY	G3-CNP 法 (JSCC 標準化対応法)	117 ± 3.5	111 - 123	609 ± 18.1	579 - 639
	シカリット [®] -N AMY	Gal-G2-CNP 法 (JSCC 標準化対応法)	110 ± 3.3	104 - 116	576 ± 17.1	547 - 605
	シカフィット AMY-G7	Et-G7-pNP 法 (JSCC 標準化対応法)	124 ± 3.7	118 - 130	649 ± 19.2	617 - 681
p-AMY	シカリット [®] p-AMY	G3-CNP 法 (JCCLS 参考値)	47	45 - 49	250	237 - 263
	シカリット [®] -N p-AMY	Gal-G2-CNP 法 (JCCLS 参考値)	47	45 - 49	246	234 - 258
	シカフィット p-AMY-G7	Et-G7-pNP 法 (JCCLS 参考値)	51	48 - 54	271	257 - 285
ChE	シカリット [®] ChE シカフィット ChE	BZTC 基質法 (JSCC 標準化対応法)	105 ± 1.9	100 - 110	547 ± 9.7	520 - 574
	シカフィット ChE J	pHBC 基質法 (JSCC 標準化対応法)	105 ± 2.5	100 - 110	553 ± 13.6	525 - 581

(単位：U/L)

注) 拡張不確かさ(包含係数 $k = 2$)

不確かさは表示値の信頼性を表現するものです。

測定結果の判断は、管理限界を参考として下さい。