

製品番号：77937

マルチキャリブ 6M

ご使用前にこの電子添文をよくお読みください。

本品は水溶液をベースとした Ca、IP、Mg、Fe、GLU、CRE の 6 項目用の標準液です。

「内容」

77937 マルチキャリブ 6M 5 mL × 3 本

「対象製品」

弊社シカリキッドシリーズ、シカフィットシリーズ他。
詳細については弊社までお問い合わせください。

「使用法」**

- ① 使用する前に本品を室温に戻します。
- ② 本品を穏やかに混和し均一とします。

「貯蔵方法・有効期間」**

- 1. 貯蔵方法：2℃～8℃
- 2. 有効期間：表示期限まで有効

「使用上の注意」**

- ① 本品は弊社対象製品について有効です。
- ② 酸性溶液ですので、皮膚等に付着した場合は直ちに多量の水で洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。

「参考文献」

- 細萱茂実、桑 克彦、濱崎直孝：臨床検査における測定の不確かさ・ケース別推定法. 臨床化学 34:40-46, 2005
- 日本臨床化学会クオリティマネジメント専門委員会：キャリブレータおよび QA 用試料の不確かさ評価方法 (Ver. 1.4). 臨床化学 32:186-199, 2003

「問い合わせ先」

関東化学株式会社 ライフサイエンス部
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 2-2-1
Tel 03-6214-1091

「製造販売元」**

関東化学株式会社
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 3-2-8
Tel 0120-260-489

「表示値表」*、**

下記表示値は本製造番号のみに有効です。

製造番号：6R0521
使用期限：2027.07.09

項目	表示値	不確かさ ^{注)}	単位	測定法	上位標準物質
Ca	9.8	± 0.15	mg/dL	クロホスホナゾⅢ法	JCCRM 321-10
IP	4.0	± 0.08	mg/dL	酵素法	NIST SRM 200b
Mg	3.2	± 0.06	mg/dL	酵素法	JCCRM 321-10
Fe	197	± 5.9	μg/dL	ニトロ PSAP 法	JCCRM 322-7
GLU	198	± 3.7	mg/dL	ヘキソキナーゼ UV 法	JCCRM 521-14
CRE	2.99	± 0.069	mg/dL	酵素法	JCCRM 521-15

注) 拡張不確かさ (包含係数 k=2)