

シカリキッド CK



体外診断用医薬品



酵素項目は関東化学のシカリキッド シリーズで！！

特長


- JSCC標準化対応試薬です。
- 環境に優しいエコパック(EPS)でのご提供も可能です。
- ダブルカイネティック(DK)モード使用により、溶血の影響を回避出来ます。
- 長期間にわたってデータが安定しています。




※EPS包装

直線性


高値直線性

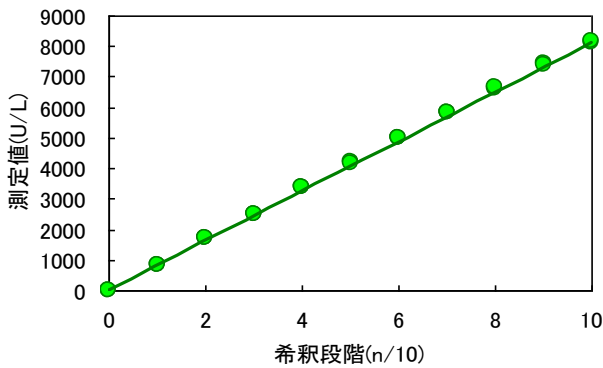

低値直線性

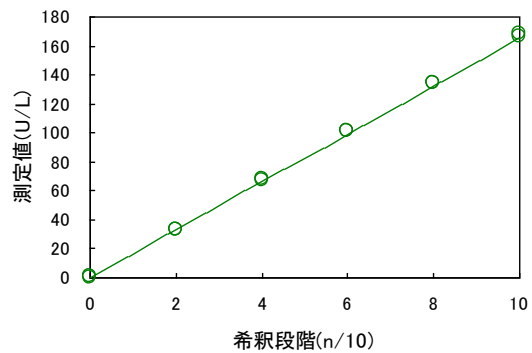

相関性

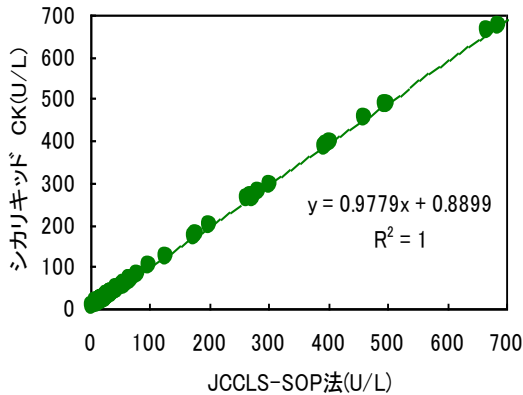

共存物質の影響

共存物質	添加濃度	影響
BIL-C	～ 20 mg/dL	5%以内
BIL-F	～ 20 mg/dL	
アスコルビン酸	～ 50 mg/dL	
乳ビ	～ 2500 ホルマジン濁度	
ヘモグロビン	～ 500 mg/dL	

同時再現性

	(U/L)	
	試料1	試料2
n	20	20
平均値	148.7	346.0
最大値	150	349
最小値	148	343
レンジ	2	6
SD	0.78	1.56
CV(%)	0.53	0.45

包装形態

製品番号	製品名	分類	内容	容量
77492	シカリキット CK	MR	試薬1	90mL × 3
77493			試薬2	40mL × 3
78219	シカリキット CK	7170	試薬1	60mL × 4
77529			試薬2	20mL × 4
77710	シカリキット CK	EPS	試薬1	70mL × 4
77711			試薬2	70mL × 2
77753	シカリキット Ck	EPS200	試薬1	200mL × 3
77754		EPS150	試薬2	150mL × 2

他の包装形態もご用意しております。お気軽に担当MRにお尋ね下さい。



関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL : 03-6214-1091

HP : <https://www.kanto.co.jp>