

シカリキッド γ -GT J



体外診断用医薬品



酵素項目は関東化学(株)のシカリキッド シリーズで！！

特長


- 日本臨床化学会(JSCC)標準化対応試薬です。
- 環境に優しいEPSパックでのご提供も可能です。
- 溶血、ビリルビンの影響を受けません。




※EPS包装

直線性


高値直線性

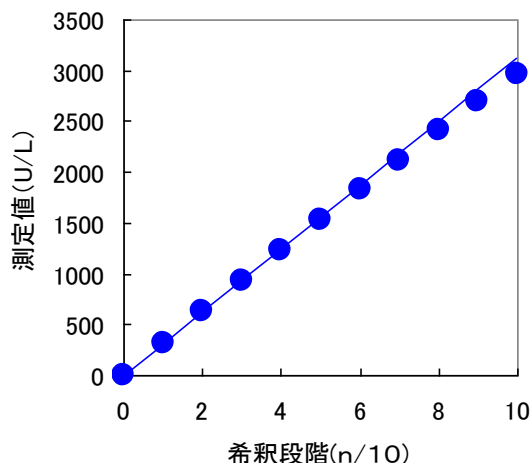

低値直線性

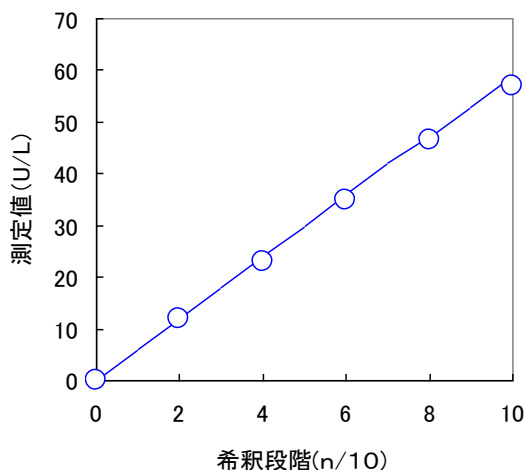

相関性

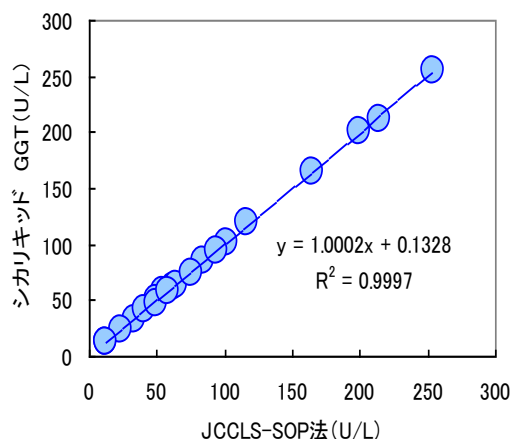

共存物質の影響

共存物質	添加濃度	影響
BIL-C	~20 mg/dL	5%以内
BIL-F	~18mg/dL	
アスコルビン酸	~50 mg/dL	
乳ビ	~1600 ホルマジン濁度	
ヘモグロビン	~500 mg/dL	

同時再現性

(U/L)

	試料1	試料2
n	20	20
平均値	34	108
最大値	35	109
最小値	33	106
レンジ	2	3
SD	0.671	1.071
CV(%)	2	1

包装形態

製品番号	製品名	分類	内容	容量
77523	シカリキット [®] γ-GT J	MR	試薬1	90mL×3
77524			試薬2	40mL×3
77530	シカリキット [®] γ-GT J	7170	試薬1	60mL×4
77531			試薬2	20mL×4
77728	シカリキット [®] γ-GT J	EPS	試薬1	70mL×4
77729			試薬2	70mL×2
77755	シカリキット [®] γ-GT J	EPS200	試薬1	200mL×3
77756		EPS150	試薬2	150mL×2

他の包装形態もご用意しております。お気軽に担当MRにお声かけ下さい。



関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL: 03-6214-1091

HP: <https://www.kanto.co.jp>