

シカリキット ALB-P



Kanto Reagents

体外診断用医薬品

BCP改良法



使いやすい点眼タイプの
液状キャリアプレート



特長

- **BCP改良法**による試薬です。
- アルブミンに特異的であり、グロブリンの測り込みがありません。
- BCP従来法において指摘されていた透析検体・保存検体等の正誤差の問題が解消されました。
- 標準血清の値付けには認証標準物質(**ERM-DA470**)を基準としています。
- リファレンス法である免疫法との相関が良好です。




Kanto Kagaku






相 関

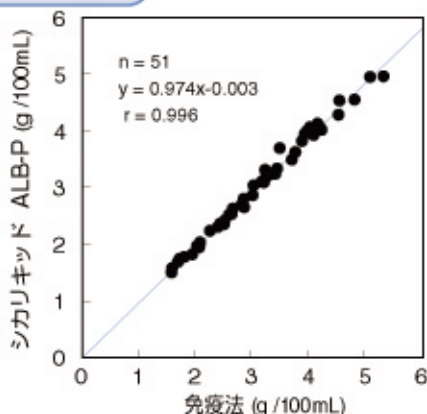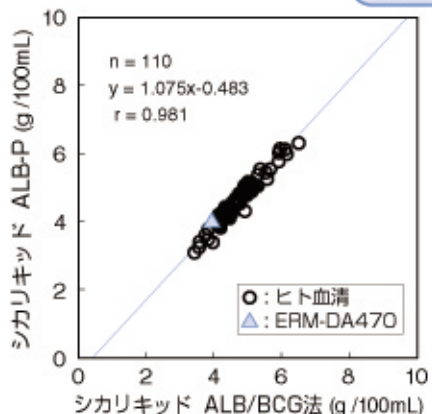

直 線 性

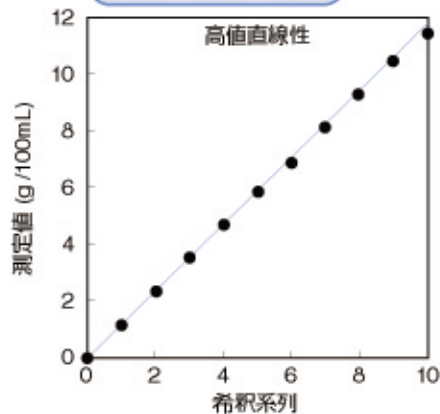

共存物質の影響

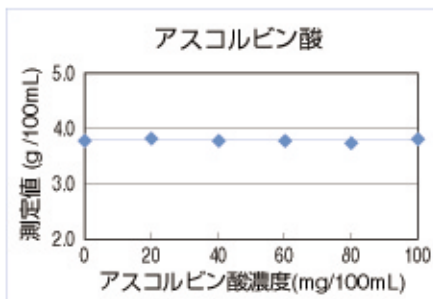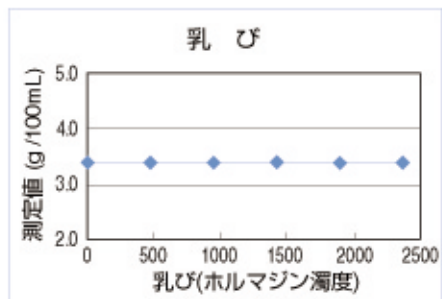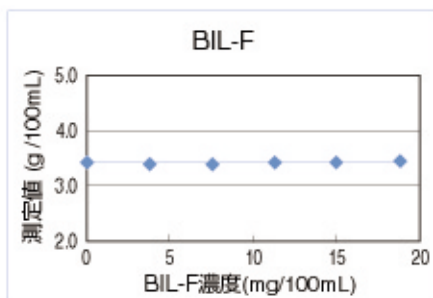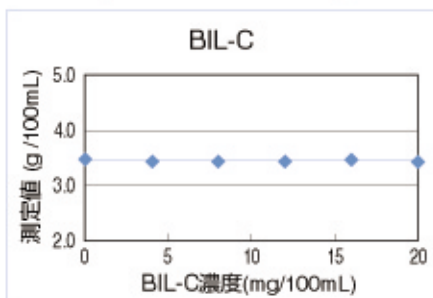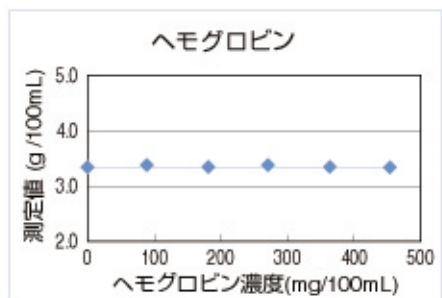

共存物質の影響は
±5%以内です。

同時再現性

	血清 1	血清 2
N	20	20
MEAN	2.40	4.41
MAX	2.5	4.5
MIN	2.3	4.3
RANGE	0.2	0.2
S.D.	0.03	0.04
C.V.(%)	1.31	1.00

包 装

製品番号	品 名 (分 類・内 容)	容 量
77219	シカリキッド ALB-P (BR) 試薬 1	150mL×2本
77220	シカリキッド ALB-P (BR) 試薬 2	75mL×2本
77221	シカリキッド ALB-P (7170) 試薬 1	60mL×4本
77222	シカリキッド ALB-P (7170) 試薬 2	30mL×4本

貯 蔵 方 法

貯蔵方法
2~10℃

有効期間
製造日より18ヶ月

検 量 物 質

製品番号	品 名	容 量
77811	TP・ALB 標準血清	3mL×3本

製造販売元



オリエンタル酵母工業株式会社

526-0804 滋賀県長浜市加納町 50 (0749) 64-2346(代)

販売元



関東化学株式会社

試薬事業本部 ライフサイエンス部

103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号 (03) 6214-1091

541-0048 大阪市中央区瓦町2丁目5番1号 (06) 6222-3709

812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目22番3号 (092) 414-9361

<< <http://www.kanto.co.jp> e-mail: diag-info@gms.kanto.co.jp >>