

シカフィット・シリーズ

# シカフィット Ca






体外診断用医薬品




## 特長

- CPZ-III（クロロホスホナゾ-III）を用いた呈色キレート法です。
- 試薬pHが弱酸性のため、開栓後の安定性に優れています。
- 蛋白の影響を受けにくい試薬です。
- キレーター分子内、試薬組成内に有害金属、重金属等を含まない環境に優しい試薬です。
- EDTAの影響は、200mg/100mLまでありません。
- Mgの影響は、20mg/100mLまでありません。


相 関 性

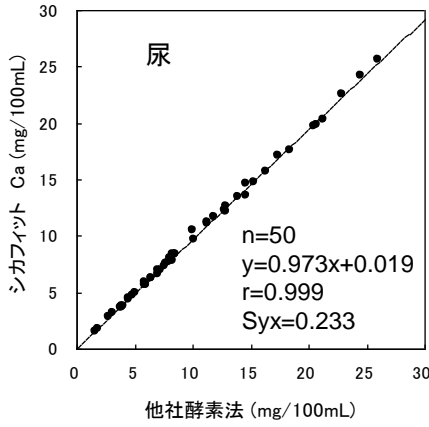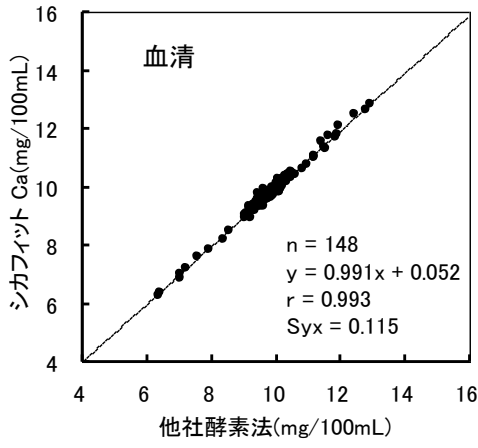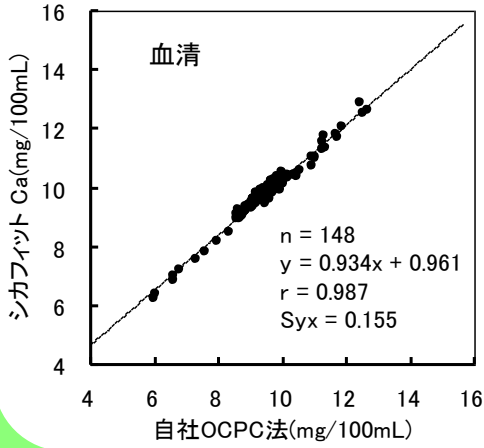

直 線 性

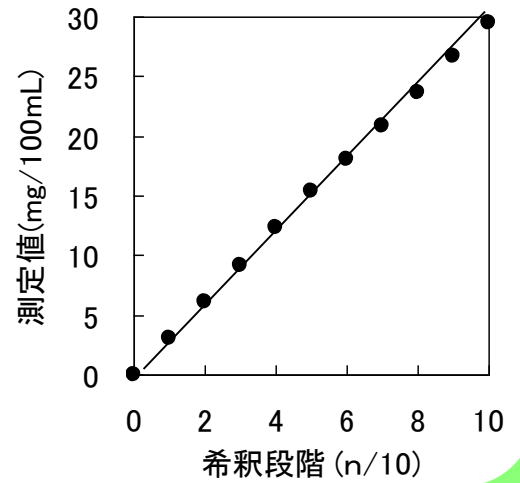


抗凝固剤の影響

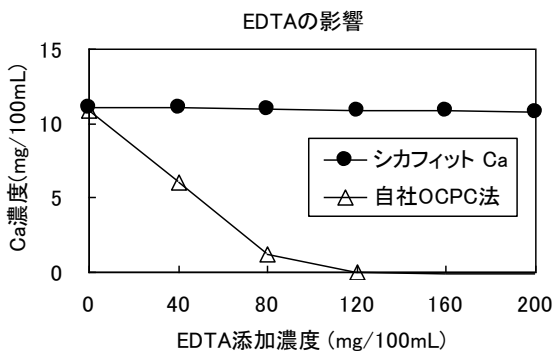


ヘパリンLi : 40mg/100mL、クエン酸 : 1000mg/100mLまで影響はありません

たんぱく質の影響

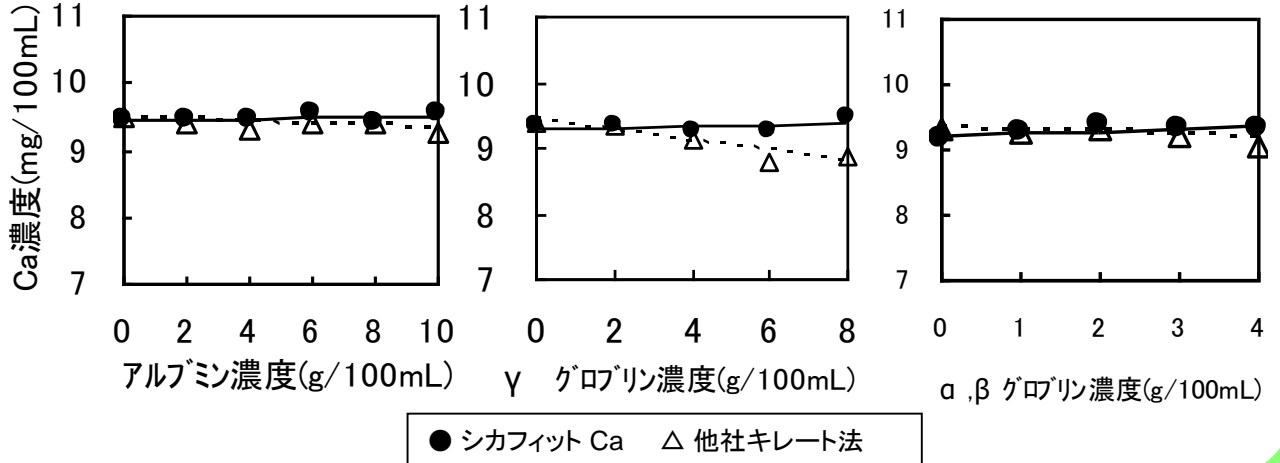

開封後安定性

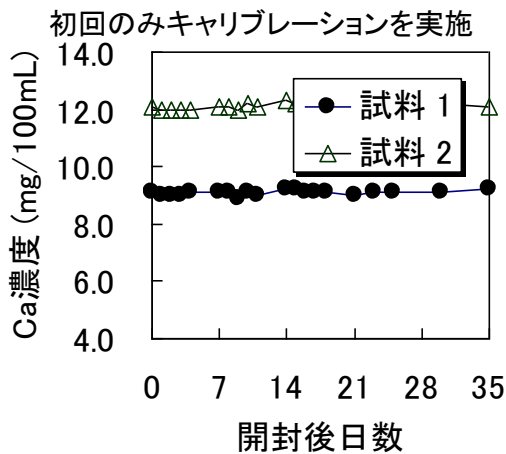

同時再現性

単位: mg/100mL

	検体 1	検体 2
n	20	20
mean	8.83	12.10
max	8.9	12.2
min	8.7	12.0
range	0.2	0.2
SD	0.056	0.067
CV(%)	0.63	0.55

共存物質の影響

共存物質	添加濃度
ヘモグロビン	519 mg/100mL
ビリルビン-C	21.1 mg/100mL
ビリルビン-F	20.6 mg/100mL
乳ビ <sup>®</sup>	1570 ホルマジン濁度
アスコルビン酸	50 mg/100mL

上記の濃度まで影響を受けません

包装形態

製品番号	製品名	分類	内容	容量
77227	シカフィット Ca	7170	試薬1	60 mL × 4
77228	シカフィット Ca	7170	試薬2	30 mL × 4
77229	シカフィット Ca	EPS	試薬1	70 mL × 4
77230	シカフィット Ca	EPS	試薬2	70 mL × 2
77231	シカフィット Ca	EPS200	試薬1	200 mL × 3
77232	シカフィット Ca	EPS150	試薬2	150 mL × 2

関連製品

製品番号	製品名	容量
77937	マルチキャリブ 6M	5 mL × 3

貯蔵方法

貯蔵方法: 2~8°C  
有効期限: 製造日より1年

**Cica** 関東化学株式会社  
試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号  
TEL: 03-6214-1091  
HP: <https://www.kanto.co.jp>