

血液検査用コリンエステラーゼキット

シカフィット ChE J



体外診断用医薬品

pHBC基質



- JSCC勧告法と同じ pHBC基質を用いた測定試薬です
- 安定性に優れています






EPS包装も
ございます

製品コード	製品名	内容	容量	貯蔵方法	有効期間
78253	シカフィット ChE J (7170)	試薬 1	60 mL × 4	2 ~ 8 °C	1 年
78254		試薬 2	20 mL × 4		
78255	シカフィット ChE J (EPS)	試薬 1	70 mL × 4	2 ~ 8 °C	1 年
78256		試薬 2	70 mL × 2		
78266	シカフィット ChE J (SPS)	試薬 1	20 mL × 3	2 ~ 8 °C	1 年
78267		試薬 2	10 mL × 3		

他の包装タイプは お問い合わせください

測定原理

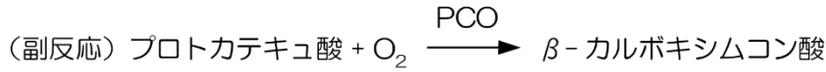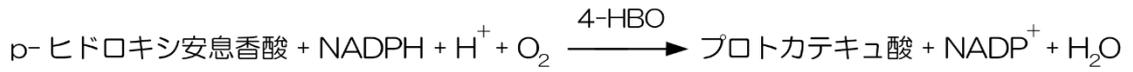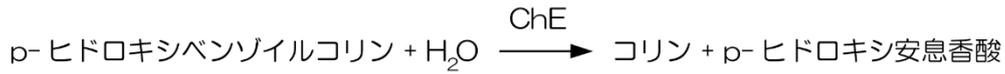


NADPHの
分解速度を測定

再現性






Sample	検体 1	検体 2
N	20	20
Mean	152.1	227.9
Max	153	229
Min	151	227
Range	2	2
S.D.	0.62	0.65
C.V.(%)	0.41	0.29

単位 : U/L


相関性

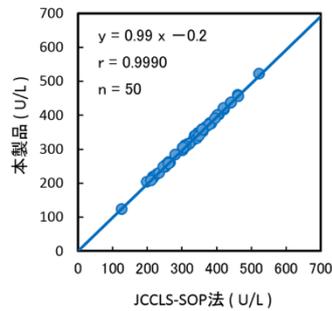


共存物質の影響

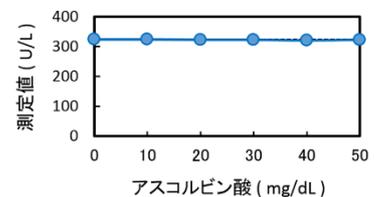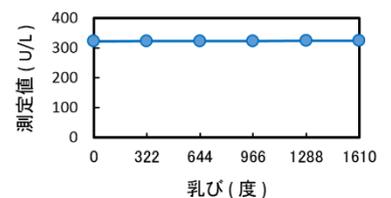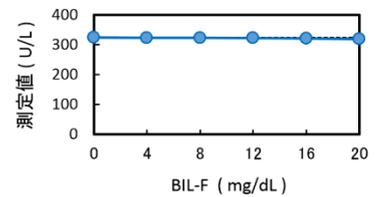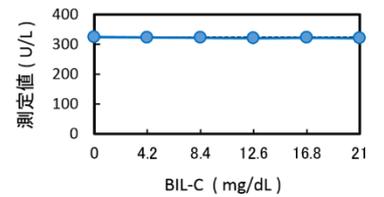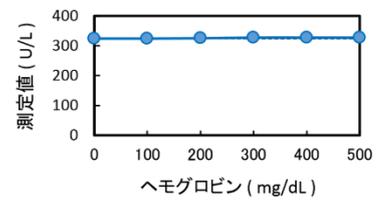


低値直線性

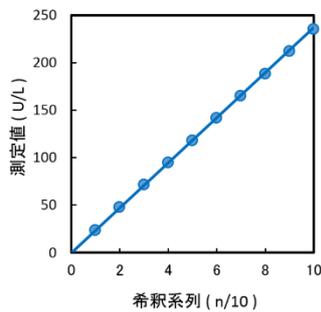


高値直線性

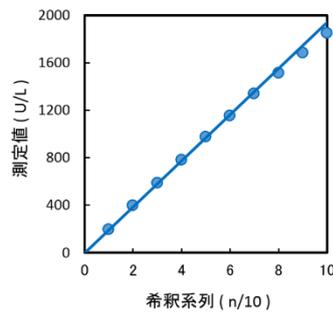

開栓安定性

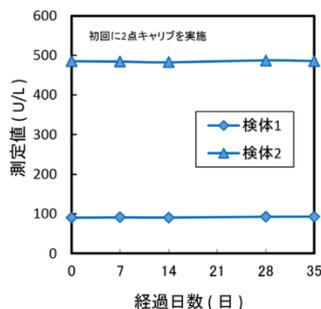

保存安定性

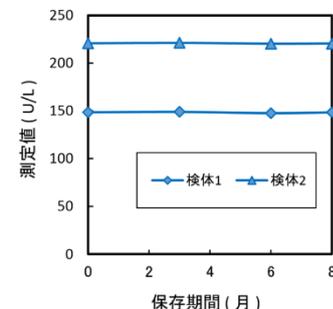

関東化学株式会社
試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 2丁目 2番 1号

TEL: 03-6214-1091

HP: <https://www.kanto.co.jp>