

マトリックスメタロプロテイナーゼ-3 測定用試薬

# サイアス MMP-3 (S)



体外診断用医薬品

## 関節リウマチ治療の 経過観察に



- ラテックス免疫比濁法を測定原理としています。
- 汎用自動分析装置にて測定することができます。

分類	コード	製品名	容量	貯法	有効期間
測定試薬	78269	サイアス MMP-3 (S)	試薬1 20 mL×2 試薬2 10 mL×1	2~8℃	1年
測定試薬	78274	サイアス MMP-3 (S LST-SX)※	試薬1 18.5 mL×1 試薬2 5 mL×1	2~8℃	1年
キャリブレータ	78270	MMP-3 標準液 (S)	1 mL×1×6濃度	2~8℃	1年
コントロール	78271	クオリトロール MMP-3 (S)	1 mL×3×2濃度	2~8℃	1年

※サイアス MMP-3 (S LST-SX)は日立LABOSPECTシリーズ専用です。


# サイアス MMP-3 (S)

## 同時再現性

Sample	検体1	検体2
N	20	20
Mean	100.0	303.2
Max	103	307
Min	97	298
Range	6	9
S.D.	1.36	2.09
C.V.(%)	1.36	0.69


単位: ng/mL

## 相関性

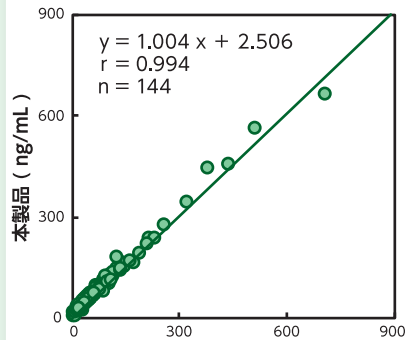


A社 ラテックス免疫比濁法 (ng/mL)


## 開栓安定性

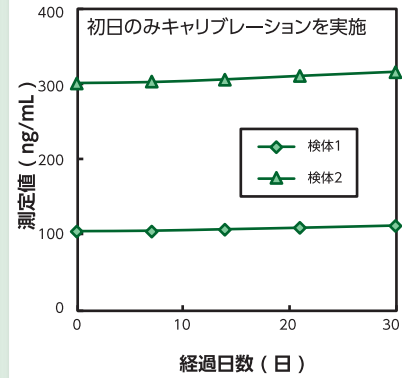


## 直線性

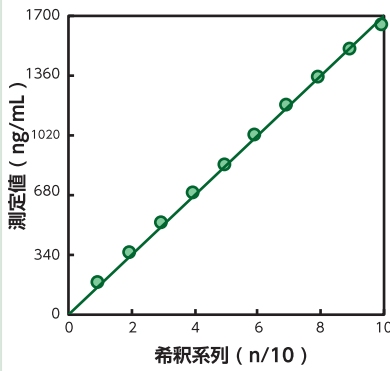







## 検出限界

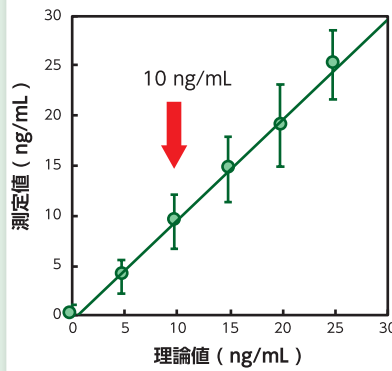

## 地帯現象

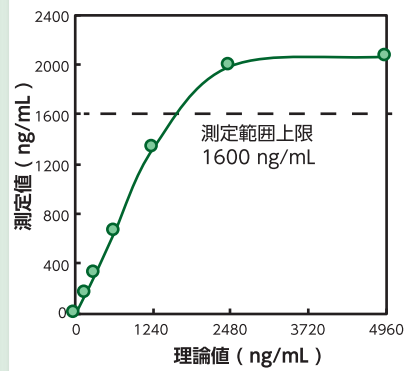

## 共存物質の影響

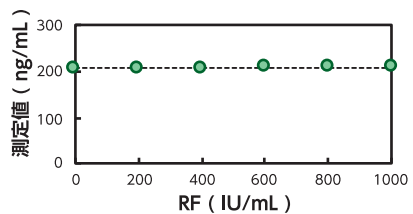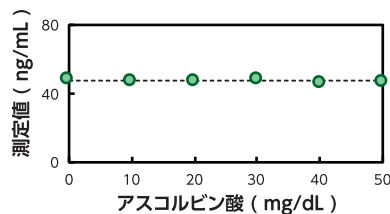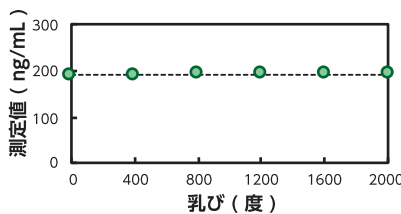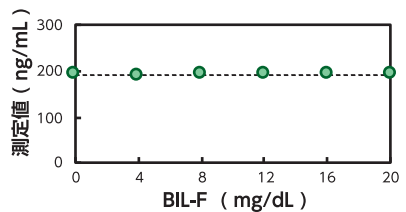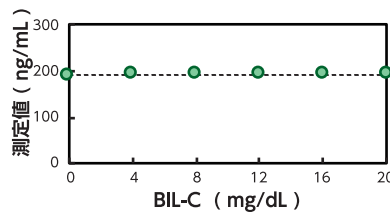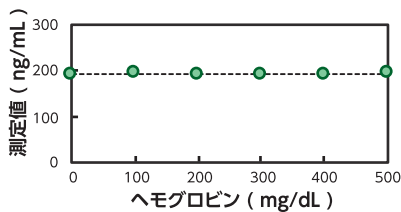

 関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL: 03-6214-1091

HP: <https://www.kanto.co.jp>