

乳酸脱水素酵素キット

シカフィット LD-IFCC



Kanto Diagnostics

体外診断用医薬品



- IFCC標準化対応試薬です
- 各種自動分析装置に適応可能です
- 開栓安定性に優れた緩衝液を使用しています

製品コード	製品名	容量	容器
78325 78326	シカフィット LD-IFCC (7170)	試薬1 60 mL×4 試薬2 33 mL×4	汎用ボトル 各種分析装置に搭載可能
78295	シカフィット LD-IFCC (C)	試薬1 52 mL×3 試薬2 28 mL×3	キャノンメディカルシステムズ(株) TBA™シリーズ専用ボトル
78329	シカフィット LD-IFCC (LST-L)	試薬1 60 mL×3 試薬2 30 mL×3	(株)日立ハイテック LABOSPECTシリーズ専用ボトル
78327 78328	シカフィット LD-IFCC (EPS)	試薬1 70 mL×4 試薬2 70 mL×2	エコパック包装

貯蔵方法: 2~8℃
有効期間: 1年

シカフィット LD-IFCC


同時再現性

Sample	検体1	検体2
N	20	20
Mean	119.67	172.34
Max	121.5	174.3
Min	117.8	170.8
Range	3.7	3.5
S.D.	1.04	1.10
C.V.(%)	0.87	0.64


単位：U/L

相関性


IFCC自動化法との相関性

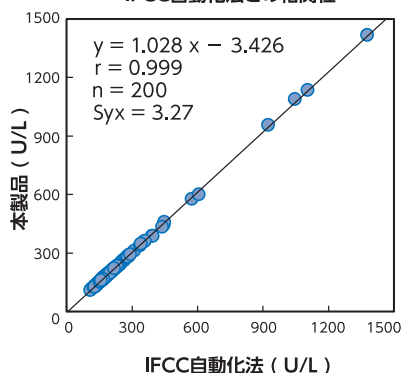


弊社JSCC標準化対応試薬との相関性

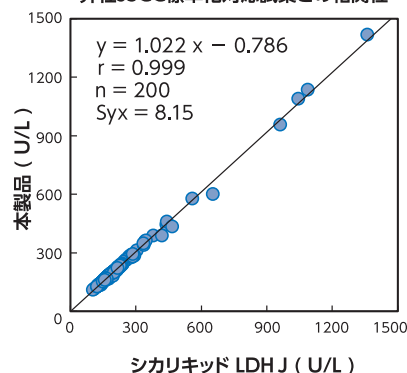


開栓安定性

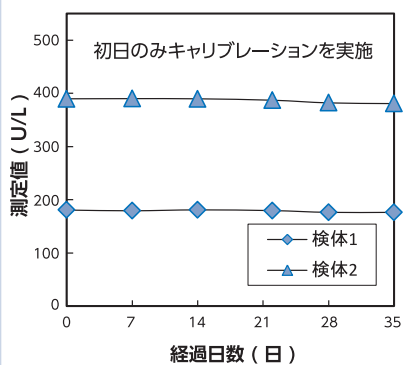






直線性(高値)

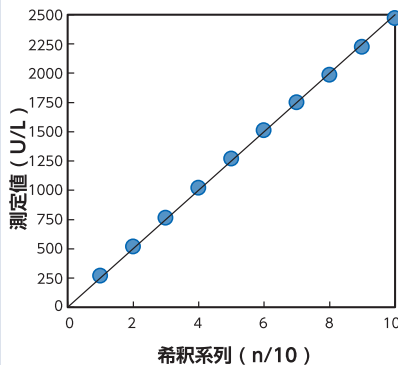

検出限界

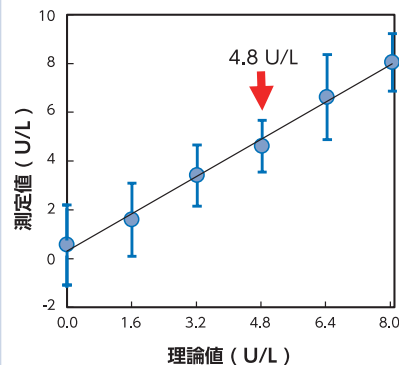

共存物質の影響

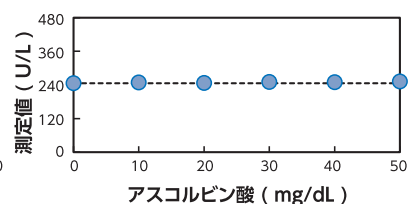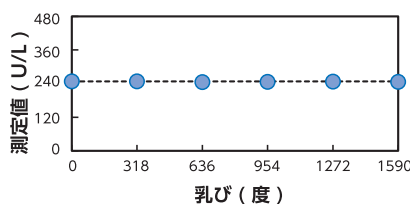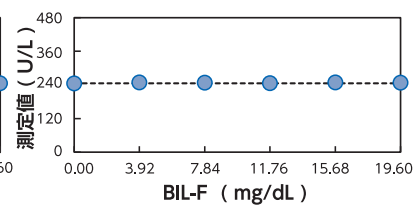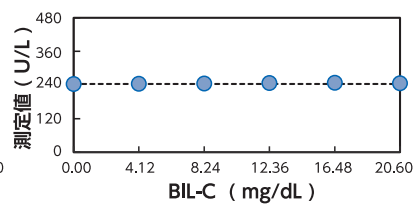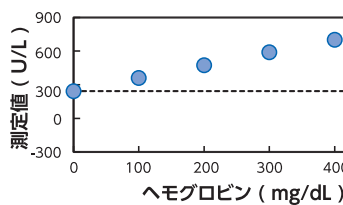

Cica 関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL: 03-6214-1091

HP: <https://www.kanto.co.jp>