

口腔液中薬物検査キット




ToxWipe™ Oral 6+

Easy and fast sample collection

本製品はOranoxis.Inc.製の口腔液中簡易薬物検査キットです。採取パッド部が薄い仕様であり、非常に迅速に口腔液中の薬物を検出することができます。イムノクロマトグラフィー法を利用しておりますので、ラインの有無により結果を判定します。


検査方法 ※検査前にデバイスを室温状態にする。

- ◆ 検体の採取 : 30秒～1分程度
- ◆ 結果判定 : 3～5分以内

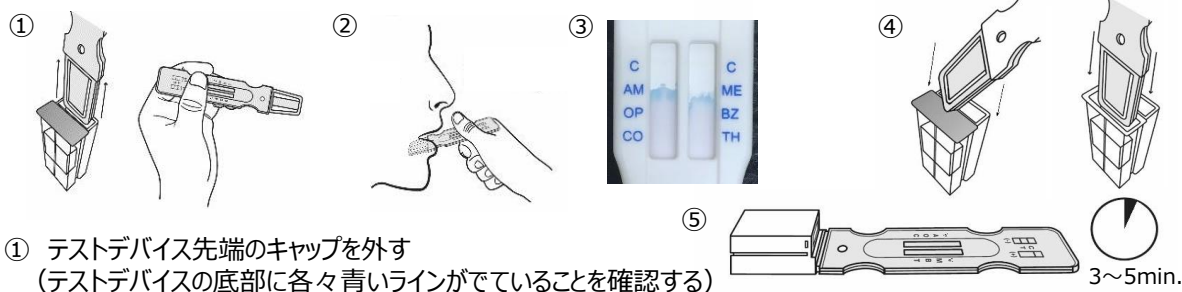


- ① テストデバイス先端のキャップを外す (テストデバイスの底部に各々青いラインがでていることを確認する)
- ② 先端の収集パッド部分を口に含み、舌や舌下部にパッドをあてて拭くように動かし、口腔液を吸収する
- ③ 青いラインが上部に移動し始めるまで、口腔液の採取(②)を繰り返す
- ④ 青いラインの上昇が確認できたら、デバイスを口から抜き、収集パッドの角で封印シールの中心を押し破り、デバイスを奥まで差し入れる (青いラインが上部に移動し、テストウィンドウ上から見えなくなれば口腔液が十分に収集されたことを示す)
- ⑤ テストデバイスを平置きし、3～5分以内の結果を確認する (5分経過後の結果は判定しない)

- 3分以内に全てのラインが明確に現れたら【陰性】
- 3分時点でいずれかのラインが現れない場合は、5分時点で再度ラインを確認する

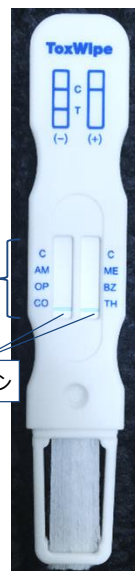

結果判定 ◇ 赤紫色のラインがある ⇒ 陰性 (-)
◆ 赤紫色のラインがない ⇒ 陽性 (+)

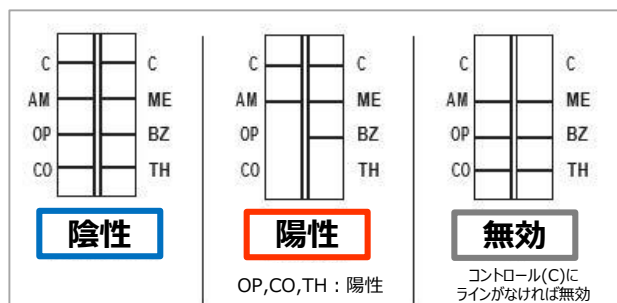

項目	対象薬物	検出感度 ng/mL
AM	アンフェタミン (覚せい剤代謝物)	50
OP	モルヒネ系麻薬	40
CO	コカイン系麻薬	20
ME	メタンフェタミン (覚せい剤)	50
BZ	ベンゾジアゼピン類	10
TH	Δ9-テトラヒドロカンナビノール (大麻)	25

製品番号	製品名	保管温度	規格	包装	価格(¥)
49600-70	ToxWipe™ Oral 6+	2～30℃	薬毒物分析用	25 test	62,000

※本製品は体外診断用医薬品ではありません。試験研究用試薬です。