

Rapid Testシリーズ

製造元：Hangzhou Alltest Biotech Co., Ltd. (中国)

Multi-Drug シリーズ

尿中薬物簡易スクリーニングキット『ラピッドテストシリーズ』では、複数項目を同時に検査できるMulti-Drugシリーズとして5種類のキットをご用意しております。『Multi-Drug 5-Sleeping pills』は、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬3種類（ゾルピデムZOL、ゾピクロンZOP、ザレプロンZAL）を含む5種類の睡眠薬系を、『Multi-Drug 4-DOA+CRE/pH』は、尿中に含まれる覚醒剤、大麻、コカイン、モルヒネの乱用薬物4種類に加え、クレアチニン、pHを同時に確認できます。また、尿中の**カフェイン**を検出対象としたキット『Multi-Drug 2-Caffeine』は、2種類の異なるカットオフ濃度10,000 ng/mLおよび50,000 ng/mLを設定した仕様です。カスタマイズも承りますので、詳しくは裏面をご覧ください。

▼使用方法（例：Multi-Drug 4-DOA+CRE/pH Rapid Test）

① デバイスの滴下部に付属のスプイトで検体尿を3滴ずつ滴下する
スプイト3滴：約120 μL

② 3～5分以内に右端の試験紙の色を確認し、色見本と比較して結果を判定する

③ 5～10分以内にラインの有無により結果を判定する

判定方法
テストゾーン(T)に
◇ 赤紫色のラインがある ⇒ 陰性 (-)
◆ 赤紫色のラインがない ⇒ 陽性 (+)

判定例：THCのみ陽性(+), CRE正常, pH正常

▶保管温度：2～30℃ ▶保証期限：製造後20～24ヶ月（外装に記載）

▼各項目とカットオフ濃度

略号	項目名	基準化合物	カットオフ濃度 (ng/mL)	49601-71	49601-76	49601-77	49601-78	49601-94
BAR	バルビツール酸系	セコバルビタール	300		○			
BZO	ベンゾジアゼピン系	オキサゼパム	300		○			
ZOL	ゾルピデム	ゾルピデム	50	○	○			
ZOP	ゾピクロン	ゾピクロン	50	○	○			
ZAL	ザレプロン	ザレプロン	50	○	○			
MET	メタンフェタミン(覚醒剤)	d-メタンフェタミン	500			○		
THC	大麻	11-nor-Δ9-THC-9-COOH	50			○		
COC	コカイン系麻薬	ベンゾイルエグニン	300			○		○
MOP	モルヒネ系麻薬	モルヒネ	300			○		
CAF	カフェイン	カフェイン	10,000 50,000				○	
KET	ケタミン	ケタミン	1000					○
LSD	リセルグ酸ジエチルアミド	リセルグ酸ジエチルアミド	20					○
MDMA	メチレンジオキシメタンフェタミン	d,l-メチレンジオキシメタンフェタミン	500					○
CRE	クレアチニン	クレアチニン	—			○		
pH	pH	pH	—			○		

製品名	包装	項目	カットオフ濃度 (ng/mL)	価格(¥)	製品番号
Multi-Drug 3-non-BZO Rapid Test	25test	3項目 (ZOL/ZOP/ZAL)	ZOL: 50 ZOP: 50 ZAL: 50	35,000	49601-71
Multi-Drug 5-Sleeping pills Rapid Test	25test	5項目 (BAR/BZO/ZOL/ZOP/ZAL)	BAR: 300 BZO: 300 ZOL: 50 ZOP: 50 ZAL: 50	45,000	49601-76
Multi-Drug 4-DOA+CRE/pH Rapid Test	25test	薬物4項目 + 確認試験2項目 (MET/THC/COC/MOP + CRE/pH)	MET: 500 THC: 50 COC: 300 MOP: 300	44,000	49601-77
Multi-Drug 2-Caffeine Rapid Test	25test	2項目 (CAF10,000 / CAF50,000)	CAF: 10,000 CAF: 50,000	45,000	49601-78
Multi-Drug 4 Rapid Test (MDMA500/COC300/KET1000/LSD20)	25test	4項目 (MDMA/COC/KET/LSD)	MDMA: 500 COC: 300 KET: 1000 LSD: 20	40,000	49601-94



Rapid Testシリーズ – 取扱項目一覧–

ご希望に応じて検査項目のカスタマイズが可能です。尿のほか、血液・唾液・毛髪・粉末などに対応可能な項目もございます。お気軽にお問合せください。

▼取扱可能項目一覧

項目	略号	項目	略号	項目	略号
AB-PINACA	ABP	フルオクタミン	FKET	アヘン剤	OPI
アセトアミノフェン	ACE	フルオキセチン	FLX	オキシコドン	OXY
7-アミノクロナゼパム	7-ACL	7-アミノフルニトラゼパム	FLZ	パパベリン	PAP
アルブトラゾラム	ALP	フェンタニル New	FYL	フェンシクリジン New	PCP
アンフェタミン	AMP	ガバペンチン	GAB	ブレガバリン	PGB
α-ピロリジノバレロフェノン	α-PVP	γ-ヒドロキシ酪酸	GHB	プロボキシフェン	PPX
アルピブrazol	ARP	ヒドロモルフォン	HMO	パロキセチン	PRT
バルビツール酸系	BAR	ケタミン	KET	シロシビン	PY
ブプレノルフィン	BUP	クラトム	KRA	クエチアピン	QTP
ベンゾジアゼピン系	BZO	リセルグ酸ジエチルアミド	LSD	リスベリドン	RPD
カチン	CAT	6-モノアセチルモルヒネ	6-MAM	スコバミン	SCOP
カフェイン	CAF	メトカチン	MCAT	合成カンナビノイド類	K2
カリソプロドール	CAR	3,4-メチレンジアミノフェタミン	MDMA	タベンタドール	TAP
カルバマゼピン	CBZ	3,4-メチレンジアミノフェタミン	MDA	三環系抗うつ薬	TCA
カンナビノール	CNB	3,4-メチレンジアミノフェタミン	MDPV	大麻	THC
カルフェンタニル	CFYL	メタンフェタミン New	MET	チアネブチン	TIA
シタロプラム	CIT	メフェドロン塩酸塩	MEP	チリジン	TLD
クロナゼパム	CLO	メスカリン	MES	チレタミン	TLTM
コカイン	COC	モルヒネ	MOP	トラマドール	TML
コデイン	COD	メチルフェニデート	MPD	トロピカミド	TRO
コチニン New	COT	メペリジン	MPRD	トラゾドン	TZD
ジアゼパム	DIA	メタカロン	MQL	UR-144	-
ジフェノキシラート	DIP	メタドン	MTD	キシラジン	XYL
デキストロメトルファン	DXM	メトミダート	MTO	ザレプロン	ZAL
1-フェニル-2-メチルピペリジン	EDDP	ミルタザピン	MTZ	ゾルピデム	ZOL
エチルグルクロニド	ETG	N,N-ジメチルトリプタミン	NND	ゾピクロン	ZOP
エトミデート New	ETO	ニタゼン	NTZ		
エスシタロプラム	ETP	オランザピン	OZP		

※仕様や項目は予告なく変更になる可能性がありますのでご了承ください。

▼製品一例（検体：尿）

製品名	包装	項目	カットオフ濃度	価格(¥)	製品番号
合成カンナビノイド(K2) 30 Rapid Test	25test	合成カンナビノイド(K2)	K2: 30 ng/mL	19,000	49601-83
MDMA500 Rapid Test	25test	MDMA	MDMA: 500 ng/mL	16,000	49601-84
MDMA1000 Rapid Test	25test	MDMA	MDMA: 1000 ng/mL	19,000	49601-85
ケタミン(KET) 1000 Rapid Test	25test	ケタミン	KET: 1,000 ng/mL	16,000	49601-86
ブプレノルフィン(BUP) 10 Rapid Test	25test	ブプレノルフィン	BUP: 10 ng/mL	20,000	49601-89
メタンフェタミン(MET) 500 Rapid Test	25test	メタンフェタミン	MET: 500 ng/mL	16,000	49601-93
エトミデート(ETO) 1000 Rapid Test	25test	エトミデート	ETO: 1000 ng/mL	24,000	49601-95
フェンシクリジン(PCP) 20 Rapid Test	25test	フェンシクリジン	PCP: 20 ng/mL	16,000	49601-96
コチニン(COT) 200 Rapid Test	25test	コチニン	COT: 200 ng/mL	16,000	49601-97
フェンタニル(FYL) 10 Rapid Test	25test	フェンタニル	フルフェンタニル: 10 ng/mL	16,000	49602-00
フェンタニル(FYL) 20 Rapid Test	25test	フェンタニル	フルフェンタニル: 20 ng/mL	16,000	49602-01
フェンタニル(FYL) 100 Rapid Test	25test	フェンタニル	FYL: 100 ng/mL	16,000	49602-02
フェンタニル(FYL) 200 Rapid Test	25test	フェンタニル	FYL: 200 ng/mL	16,000	49602-03
フェンタニル(FYL) 300 Rapid Test	25test	フェンタニル	FYL: 300 ng/mL	16,000	49602-04
アセトアミノフェン(ACE) Rapid Test	25test	アセトアミノフェン	ACE: 25/50/100 µg/mL	要見積	-
LSD(50/20/10) Rapid Test	25test	LSD	LSD: 50/20/10 ng/mL	要見積	-
THC100 Rapid Test	25test	THC	THC: 100 ng/mL	要見積	-

- 本記載の製品は、試薬（試験、研究用として用いる化学薬品）であり、体外診断用医薬品ではありませんので、診断等の目的では使用しないでください。
- 本記載価格に、消費税等は含まれておりません。
- 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-Web」をご確認ください。



関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL: 03-6214-1094

HP: <https://www.kanto.co.jp>

EA260105 RFA-14 (202601)